



Problemi di calcificazioni BTK? Abbiamo buone notizie!

PREVEDIBILMENTE SICURO

Tratta le calcificazioni in modo sicuro riducendo significativamente il rischio di complicanze, per rendere le procedure più prevedibili ed efficienti.

DECISAMENTE INTUITIVO

Semplifica il trattamento delle calcificazioni fin da subito, grazie a un meccanismo d'azione unico su una piattaforma intuitiva.

COSTANTEMENTE EFFICACE


Comprovato ottenimento di bassa stenosi residua in letti vascolari multipli, attraverso la frantumazione delle calcificazioni superficiali e profonde.

Efficace per le calcificazioni intimali e mediali


IVL è efficace per frantumare le calcificazioni intimali e mediali.

ARTERIA TIBIALE POSTERIORE OCCLUSA

Angiogramma
diagnostico
pre IVL

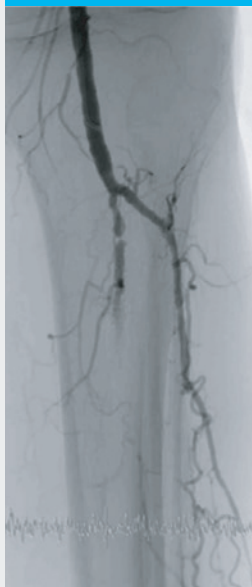

Angiogramma
finale post IVL

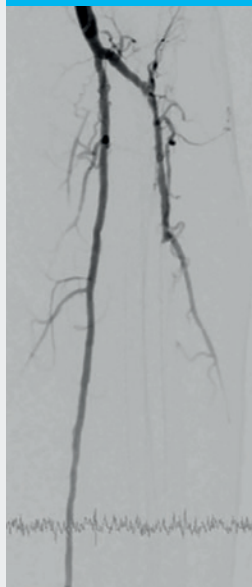

BIFORCAZIONE DELL'ARTERIA TIBIALE
ANTERIORE E POSTERIORE CALCIFICATA

Angiogramma
diagnostico




Angiogramma
finale post IVL



Analisi intermedia PAD III OS: Trattamento con IVL delle arterie infrapoplitee calcificate

I risultati dello studio osservazionale Disrupt PAD III BTK si aggiungono all'insieme delle evidenze dell'IVL, confermando la sicurezza e l'efficacia costanti dell'IVL in letti vascolari multipli.

Diametro stenosi (Core-Lab)

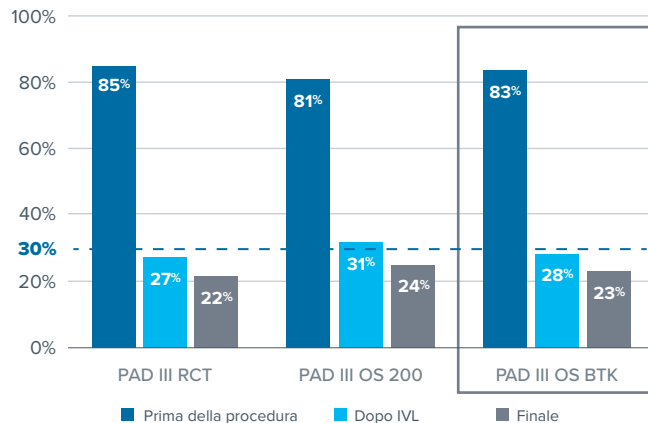

OS: osservazionale; PAD: Arteriopatia periferica; RCT: Controllato randomizzato.

1. Adams et al., J EVT, 2020;27(3):473-480. 2. Dados apresentados por G. Adams, LINC 2021

Complicanze angiografiche finali (Core-Lab)

	PAD III RCT	PAD III OS 200 ¹	PAD III OSBTK ²
N	153	200	96
Vasi	SFA/Pop	Iliaco, CFA, SFA/Pop, BTK	Infrapopliteo
Dissezione (tipo D-F)	0%	1.1%	0%
Perforazione	0%	0.5% [†]	0%
Embolizzazione	0%	0%	0%
Trombo	0%	0%	0%
Nessun riflusso	0%	0%	0%
Brusca chiusura	0%	0%	0%

[†]A seguito inflazione palloncino DCB; non correlata a IVL

SPECIFICHE DEL GENERATORE E DEL CAVO DI CONNESSIONE IVL

Potenza	90-240 VCA; 50-60Hz; monofase, servizio 15A	 Generatore IVL NUMERO DI CATALOGO: IVLGCCD
Dimensioni	11" (28,0 cm) altezza x 6" (15,2 cm) larghezza x 11,5" (29,2 cm) profondità	
Peso	6 libbre (2,7 kg)	
Uscita	Sistema proprietario di erogazione degli impulsi. Tensione di uscita 3000 volt di picco, frequenza di impulso 1Hz	
Mobilità	Prodotto destinato a essere montato su un'asta per flebo	
Lunghezza	5 piedi (1,53 m)	 Cavo di connessione NUMERO DI CATALOGO: IVLCC
Compatibilità	Chiave maschio proprietaria destinata distalmente a connettersi solo a un catetere	
Funzionamento	L'impulso della litotrixxia viene attivato premendo un pulsante sul cavo di connessione	
Utilizzo	Riutilizzabile	

SPECIFICHE DEL CATETERE IVL

Numero di catalogo	Diametro (mm)	Lunghezza (mm)	Emettitori	Impulsi/ciclo	Cicli	Filo guida (pollici)	Guaina compat.	Lunghezza utile (cm)	GTIN
S4IVLK2540	2.5	40	4	20	8	0.014	5F	135	00195451000317
S4IVLK3040	3.0	40	4	20	8	0.014	5F	135	00195451000324
S4IVLK3540	3.5	40	4	20	8	0.014	5F	135	00195451000331
S4IVLK4040	4.0	40	4	20	8	0.014	5F	135	00195451000348

SPECIFICHE DEL MANICOTTO STERILE

Numero di catalogo	Lunghezza (cm)	Lunghezza (in)	Descrizione	Quantità	GTIN
IVL10CS	13 x 244	5 x 96	Manicotto per cavo IVL	10	(01)10848340014571

Scopri un modo più efficace per il trattamento delle calcificazioni grazie al sistema di litotrixxia intravascolare periferica (IVL).

Visita il sito shockwavemedical.com o chiama il numero **877-77-LITHO (877-775-4846)** per ulteriori informazioni.

Prima dell'uso, consultare le Istruzioni per l'uso per ulteriori informazioni su indicazioni, controindicazioni, avvertenze, precauzioni ed eventi avversi.
www.shockwavemedical.com/IFU